

TEST NA DROGE

Splošne informacije:

Test je primeren za testiranje katerekoli kombinacije naslednjih mamil: Kokain (COC), Amfetamin (AMP), Metamfetamin vključno z ekstazijem (mAMP), kanabis (THC), Opiati vključno s heroinom (OPI), Benzodiazepini (BZO).

Hiter, enostaven test za simultano kvalitativno odkrivanje različnih mamil in metabolitov v človeškem urinu.

Ta test zagotavlja preliminaren analitični testni rezultat, če je vsebnost mamila v vzorcu urina nad določenim nivojem. Za pridobivanje odobrenega analitičnega rezultata je potrebna bolj specifična kemična metoda.

OPOZORILO:

Pozitiven rezultat pomeni vsebnost mamil, vendar ne prikazuje stopnje zastrupitve ali metode, po kateri je bila odkrita. Test ne loči mamil, namenjenih zlorabi, ter nekaterih vrst zdravil. Pozitiven rezultat testa lahko povzročijo določena živila in prehranski dodatki. Napake pri postopku ali moteče substance v urinu lahko povzročijo neustrezne rezultate.

Sestavine testa:

- 1 testna ploščica za 6 različnih skupin mamil, listek z navodili.

Zahtevani materiali, ki niso priloženi:

- Zbiralna posoda za urin, štoparica

NAVODILA ZA UPORABO


Priprava:

Pustite zavoj s folijo zaprt, dokler niste pripravljeni za izvajanje testa. Najprej pridobite vzorec urina (približno 2 cm globine je dovolj) ter počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo. Pred odpiranjem počakajte, da se zavoj s testnimi ploščicami ogreje na sobno temperaturo (15°– 30°C).

Prepojte testni trak z urinom:

Odstranite testno ploščico od zavoja ter odstranite zaščitni pokrov na spodnjem delu ploščice. S puščicami, usmerjenimi proti vzorcu urina, namočite testno ploščico v urin vsaj do nivoja valovitih črt, vendar ne zmočite puščic. Ploščica naj bo namočena 1 minuto (glej sliko).

Postavite testno ploščico na ravno površino, ki ne omogoča vsrkavanja tekočine (lahko tudi embalaža ali zavoj s folijo) in začnite meriti čas. Izid testa berite po 5 minutah. Izida testa ne tolmačite po 10 minutah.

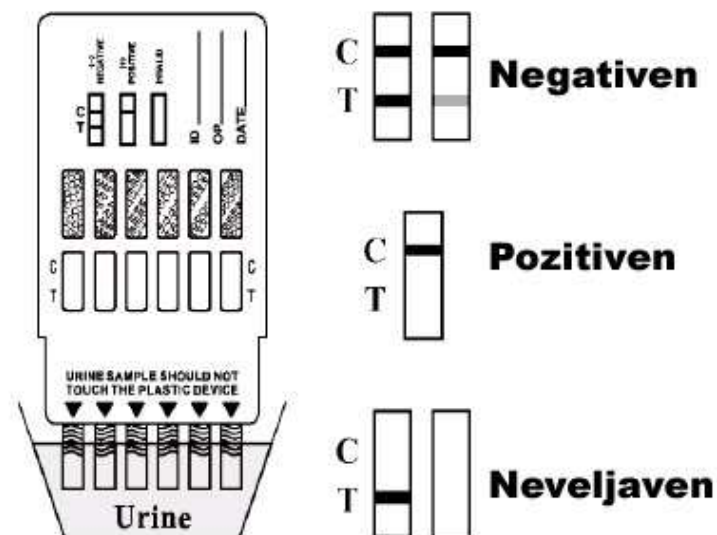

Ocenjevanje izidov testa:

Pozitiven rezultat v posameznem okencu nakazuje vsebnost posameznega mamila in ne ostalih mamil.

Pozitiven izid: Pojavi se ena barvna črta na kontrolnem delu posameznega okenca (označena s črko »C«). Testni del okenca (označen s črko »T«) ostane prazen. Vsak trak prikazuje različno mamilo.

Negativen izid: V posameznem okencu se pojavita dve obarvani črti: ena v testnem območju (T) in druga v kontrolnem območju (C).

Neveljaven izid: Kontrolne črte se ne pojavijo. Najverjetnejša vzroka za to sta nezadostna količina vzorca ali nepravilnen postopek izvajanja testa. Če se to ponavlja, se obrnite na proizvajalca.

OMEJITVE

1. Ta test zagotavlja zgolj preliminarni analitični rezultat. Za potrjen test je potrebna bolj specifična kemična metoda (npr. GC/MS).
2. Tehnične napake ali napake v procesu ali druge moteče substance v urinu lahko povzročijo napačne rezultate.
3. Kontaminanti kot npr. belilo v vzorcu urina prav tako lahko povzročijo napačne rezultate, ne glede na uporabljeno analitično metodo. Če obstaja tovrsten sum, ponovite test z drugim vzorcem urina.
4. Pozitiven izid nakazuje prisotnost mamila ali njegovih metabolitov, ne pa stopnje intoksikacije, aplikacije ali koncentracije v urinu.

5. Negativen izid ne izključuje nujno odsotnosti mamila v urinu. Do negativnega izida lahko pride v primeru prisotnosti mamila v urinu, vendar pod ostro ločilno mejo testa.

6. Test ne loči med mamili, namenjenim zlorabi, in nekaterimi vrstami zdravil.

7. Do pozitivnega izida lahko pride tudi zaradi uživanja določenih živil in prehranskih dodatkov.

Kaj naredim, če je izid testa pozitiven na kateremkoli testnem traku?

Obrnite se na svojega zdravnika za nasvet in morebitno ponovno testiranje. Ne sprejemajte nobenih zdravstvenih odločitev samo na podlagi tega testa.

Pred uporabno natančno preberite navodila!

Hranite izven dosega otrok.

Ne uporabljate testa po datumu zapadlosti.

(Glej rob škatle)

Hranite pri 2° - 30°C (35.6° - 86°F).

Test uporabite samo enkrat.

Ne razstavite testne ploščice.

Ne zaužijte nobenega dela testa.

Zgolj za eksterno uporabo.

In-vitro forenzična naprava za samotestiranje.