

## TEST GONOREJE

Gonoreja je resna spolno prenosljiva bolezen (SPB). S pomočjo osebnega diagnostičnega testa za gonorejo je prisotnost antigena gonoreje v genitalnih izločkih zlahka preverljiva. V vsakem primeru je visoko število protiteles sumljivo in zadosten razlog za obisk zdravnika.

### **Opozorila:**

Ne uporabite kompleta, če je vrečka preluknjana ali slabo zaprta. Shranjujte izven dosega otrok.

### **Vsebina:**

Posamezni komplet vsebuje 1 vatirano paličico, 1 testno kaseto, 1 plastično epruveto, tekočino A, tekočino B in odstranjevalec vlage. Odstranjevalec vlage je namenjen shranjevanju in ga ne boste potrebovali med postopkom testiranja.

### **Shranjevanje:**

Shranjujte na temperaturi 4-30° C v zapečateni ovojnici najkasneje do datuma uporabnosti. Pazite, da testni komplet ne bo izpostavljen direktni svetlobi, vlagi ali vročini.

### **Potrebni pripomočki:**

Čista in ravna podlaga in osebni diagnostični test za gonorejo.

### **Postopek testiranja:**

Test opravite na sobni temperaturi (18-30° C).

1. **Moški:** Bris vzemite iz sečne odprtine na glavici penisa.

**Ženske:** Vzemite bris iz vaginalne odprtine, nato pa vatirano paličico za 30 sekund vstavite v nožnico. Izvlecite vatirano paličico.

2. Vatirano paličico s brisom položite v plastično epruveto in na bris kapnite 6 kapljic tekočine A. Paličico zavrtite in iz nje iztisnite tekočino, tako da jo pritisnete ob steno epruvete. Paličico nato zavrzite.

3. Dodajte 3 kapljice tekočine B v plastično epruveto in dobro premešajte. Bris lahko shranite v hladilniku na temperaturi 4-8° C.

Test opravite v roku 24 ur po vzetju brisa.

4. Odprite zapečateni vrečico in iz nje vzemite testno kaseto. Položite jo na suho ravno površino.

5. Zaprite epruveto s pokrovčkom in iztisnite 4 kapljice testne tekočine v odprtino na testni kaseti.

6. Na rezultat počakajte 5 minut. Ne čakajte več kot 15 minut.

### **Branje rezultatov:**

1. V levem delu okenca za rezultat se bo pojavila barvna kontrolna črtica, ki potrjuje delovanje testa (črtica C).

2. Desni del okenca za rezultat prikazuje rezultat testa. Če se v njem prikaže barvna črtica, gre za testno črtico (črtica T).

**Pozitiven rezultat:** 2 obarvani črtici (črtica C in T) v okencu za rezultat pomenita pozitiven rezultat. Ni važno, katera barvna črtica se je pojavila prej. Ponavadi je barva črtice T bolj intenzivna, če je število protiteles v brisu zelo visoko. Če je število protiteles komaj zaznavno, je črtica bolj blede barve.

**Negativen rezultat:** 1 obarvana črtica (črtica C) v okencu za rezultat pomeni negativen rezultat.

**Neveljaven test:** Če se po opravljenem testu na okencu za rezultat ne pojavi nobena obarvana črtica, je test neveljaven. Razlog za to je lahko med drugim neupoštevanje navodil ali pretečen rok uporabnosti.

**Omejitve testa:** Čeprav je osebni diagnostični test za gonorejo zelo zanesljiv, se lahko pojavijo tudi napačni rezultati. Če so rezultati nejasni, se raje odpravite k zdravniku ali opravite še en test. **Kot velja za vse diagnostične teste, lahko končno diagnozo postavi šele zdravnik, ki opravi klinični pregled ali laboratorijski test.**

### **Opozorila:**

1. Test je namenjen le enemu posamezniku in se ga ne sme deliti z drugo osebo.

2. Ves komplet odvrzite v koš za nevarne biološke odpadke.

3. Kompleta ne uporabite po pretečenem roku uporabnosti.

4. Komplet je namenjen izključno za diagnozo in vitro. Komplet je namenjen zunanji uporabi. Ne pogoltnite.

