


INSTI® HIV-1/HIV-2 test za HIV

Test je namenjen individualni uporabi za odkrivanje HIV-1/HIV-2 protiteles v krvi, serumu ali EDTA plazmi. Diagnoza *in vitro*. Namenjen je izključno zunanji uporabi. Komplet vsebuje: 1 podstavek, 1 stekleničko z razredčilom, 1 stekleničko z barvilom, 1 stekleničko z bistro raztopino, 1 pipeto za enkratno uporabo, 1 lanceto, 1 alkoholno gazo in navodila za uporabo. Test se opravi v 4 enostavnih korakih, rezultat pa je viden že po 1 minuti.


Postopek:

1. V stekleničko št. 1 dodajte 50 µ odzete krvi, seruma ali plazme.
2. Dobro pretresite stekleničko in vsebino vlijte na podstavek.
3. Odprite stekleničko št. 2 in tekočino vlijte na podstavek.
4. Odprite stekleničko št. 3 in tekočino vlijte na podstavek. Rezultate preberite takoj (v roku 5 minut).

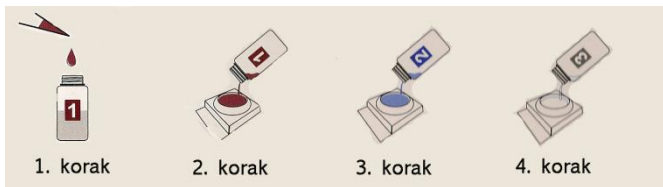

Branje rezultatov:

Rezultat je viden že 60 sekund po vseh opravljenih korakih. Ko berete rezultate bodite pozorni, da je podstavek obrnjen z nogo (N) proti vam. Rezultat pokažeta 2 obarvani piki, kontrolna (K) in testna (T).

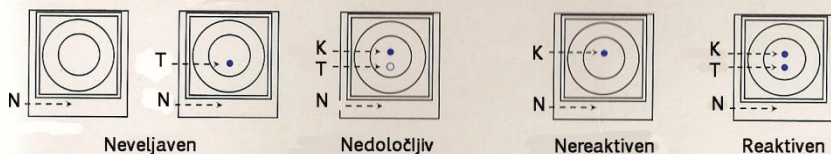

V kolikor se jasno obarva kontrolna (K) pika, testna (T) pa ne, pomeni da je test **nereaktiven** (negativen rezultat). Če se jasno obarvata tako kontrolna (K) kot testna (T) pika, je test **reaktiven** (pozitiven rezultat). Rezultat testa je **neveljaven**, če se ne obarva nobena izmed pik ali se obarva le testna (T) pika. Jasno obarvana kontrolna (K) pika in blede obarvana testna (T) pika pomenita, da je rezultat testa **nedoločljiv**.

Reaktiven test mora biti berljiv z golim očesom. Če so rezultati nejasni, test ponovite. Če je rezultat testa nedoločljiv ali reaktiven, naj diagnozo potrdi še laboratorijski test pri zdravniku.

Opozorila:

Pred izvajanjem testa podrobno preberite navodila. Vrečke s testom ne odprite, dokler niste pripravljeni, da opravite test. Testa ne uporabite, če je vrečka strgana, kakorkoli poškodovana ali odprta. Posamezni test uporabite le enkrat. Testa ne uporabite, če je njegov rok uporabnosti pretečen. Hranite izven dosega otrok. Shranjujte v suhem prostoru na temperaturi 15° C - 30° C.

Koraki 1-4 morajo biti izvršeni po vrsti in brez zamika. 2. korak mora biti izvršen v roku 5 minut po 1. koraku. Če pride do zamika med 1. in 2. korakom, ponovno zmešajte tekočino v steklenički tako, da jo nekajkrat obrnete na glavo, preden zlijete tekočino na podstavek. Nato takoj nadaljujte s 3. in 4. korakom. Kri iz prsta vzemite naenkrat, saj lahko pri večkratnih odvzemih manjše količine krvi pride do nepravilne količine krvi v vzorcu. Konica prsta, iz katerega boste vzeli kri, naj bo topla. Poskrbite, da je konica prsta po tem, ko jo razkužite z alkoholno gazo in preden z lanceto odvezmete vzorec krvi, popolnoma suha.