

TEST KLAMIDIJE ZA ŽENSKO

Klamidija je resna spolno prenosljiva bolezen (SPB). S pomočjo osebnega diagnostičnega testa za klamidijo je prisotnost antigena klamidije v celicah materničnega vratu zlahka preverljiva. V vsakem primeru je visoko število protiteles sumljivo in zadosten razlog za obisk zdravnika.

Opozorila:

Ne uporabite kompleta, če je vrečka preluknjana ali slabo zaprta. Shranjujte izven dosega otrok. Ustvarite sterilno okolje. Ne jejte, pijte ali kadite v prostoru, kjer boste izvajali test. Nosite zaščitna oblačila.

Vsebina:

Posamezni komplet vsebuje 2 vatirani paličici, 1 testno kaseto, 1 plastično epruveto, tekočino A, tekočino B in odstranjevalec vlage. Odstranjevalec vlage je namenjen shranjevanju in ga ne boste potrebovali med postopkom testiranja.

Shranjevanje:

Shranjujte na temperaturi 4-30° C v zapečateni ovojnici najkasneje do datuma uporabnosti. Pazite, da testni komplet ne bo izpostavljen direktni svetlobi, vlagi ali vročini.


Potrebni pripomočki:

Čista in ravna podlaga, rokavice za enkratno uporabo in osebni diagnostični test za klamidijo.

Postopek testiranja:

Test opravite na sobni temperaturi (18-30° C).

1. S prvo vatirano paličico odstranite odvečno sluz iz zadnjega dela materničnega vratu. **Če tega ne naredite, lahko test pokaže lažen pozitiven rezultat!**
2. Vstavite drugo vatirano paličico v nožnico, tako da je držalo še komaj vidno. Vrtite paličico 15-30 sekund in jo nato odstranite iz nožnice, ne da bi se z njo dotaknili katerekoli vaginalne površine. Bris lahko shranite v plastični tubi v hladilniku na temperaturi 4-8° C. Test opravite v roku 72 ur po vzetju brisa.
3. V plastično epruveto kanite 3 kapljice tekočine A.
4. Potopite bris v plastično epruveto in ga vrtite 10 sekund, da se tekočini zmešata.
5. Plastično epruveto z brisom položite v stojalo (ni del kompleta) in počakajte 10 min.
6. Po 10-ih minutah odstranite tekočino iz brisa, tako da paličico pritisnete ob steno plastične epruvete.
7. Dodajte 1 kapljico tekočine B v plastično epruveto in dobro premešajte. Počakajte 10 minut.
8. Odprite zapečateni vrečko. Ven vzemite testno kaseto in jo položite na čisto ravno površino.
9. Zaprite kapalko s pokrovčkom in iztisnite 3 kapljice testne tekočine v odprtino na testni kaseti.
10. Na rezultat počakajte 15 minut.

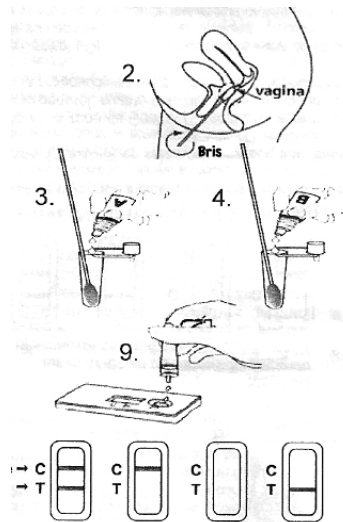

Branje rezultatov:

1. V levem delu okenca za rezultat se bo pojavila barvna črtica, ki potrjuje delovanje testa (črtica C).
 2. Desni del okenca za rezultat prikazuje rezultat testa. Če se v njem prikaže barvna črtica, gre za testno črtico (črtica T).
- Pozitiven rezultat:** 2 obarvani črtici (črtica C in T) v okencu za rezultat pomenita pozitiven rezultat. Ni važno, katera barvna črtica se je pojavila prej. Ponavadi je barva črtice T bolj intenzivna, če je število protiteles v brisu zelo visoko. Če je število protiteles komaj zaznavno, je črtica bolj blede barve.

Negativen rezultat: 1 obarvana črtica v okencu za rezultat pomeni negativen rezultat.

Neveljaven test: Če se po opravljenem testu na okencu za rezultat ne pojavi nobena obarvana črtica, je test neveljaven.

Razlog za to je lahko med drugim neupoštevanje navodil ali pretečen rok uporabnosti.

Omejitve testa: Čeprav je osebni diagnostični test za klamidijo zelo zanesljiv, se lahko pojavijo tudi napačni rezultati. Če so rezultati nejasni, se raje odpravite k zdravniku ali opravite še en test. **Kot velja za vse diagnostične teste, lahko končno diagnozo postavi šele zdravnik, ki opravi klinični pregled ali laboratorijski test.**

Opozorila:

1. Test je namenjen le enemu posamezniku in se ga ne sme deliti z drugo osebo.
2. Ves komplet odvržite v koš za nevarne biološke odpadke.
3. Kompleta ne uporabite po pretečenem roku uporabnosti.
4. Komplet je namenjen izključno za diagnozo in vitro. Komplet je namenjen zunanji uporabi. Ne pogoltnite.